



Vorher	Aktion		Nachher	Zimmer-Lampe
		Zimmer-Ruf → Rote Taste leuchtet		
		Anwesenheit im Zimmer → Grüne Taste leuchtet		
		Löscht die Anwesenheit → „Meldung geht“		
		Taste im Zimmer oder am Bett „Notruf“ → Rote Taste und Lampe <b>blinken</b>		
		„WC-Ruf“ → Anzeige WC-Ruf		
		Anwesenheit im Zimmer → Grüne Taste leuchtet		
	ca. 3 Sek. ziehen			



Bei Ruf in einem anderen Zimmer erscheint eine Meldung in der Anzeige.  
Zusätzlich ein Signalton alle 20 Sekunden.



Bei „Notruf“ in einem anderen Zimmer ist der Signalton im Sekundentakt.



Bei mehreren Meldungen können Sie durchblättern.



Kurzes Drücken (Stumm) :  
Schaltet den Signalton bis zum nächsten Ruf ab.

Langes Drücken (Merken):  
Löscht die letzte Meldung aus der Anzeige,  
speichert sie, und holt sie nach einer eingestellten  
Zeit zurück in die Anzeige.

Ein „Notruf“ lässt sich weder „Merken“  
noch „Stumm“ schalten!



Sind alle Meldungen wieder weg.  
Dann wird das Display dunkel.  
Die Anwesenheit bleibt gesetzt !

