

Anlernen der Funkortung

Gültig für Zimmerelektronik


910241 / 910251	KlickLine
910264	Call-Line 2
911251	KlickLine 2Dr. Zi-Bus
911264	Call-Line 2

mit zusätzlichem integriertem Funkempfänger





Für die Programmierung der Funkortung darf der Armband- oder Halsbandsender noch **NICHT** an der Zimmerelektronik angelernt sein!
Ggf. ist der Funkspeicher in der Zimmerelektronik vorher zu löschen!

Für die Programmierung eines mobilen Funksenders für die Funkortung benötigen Sie den IR-Sender mit der Kennung '10'

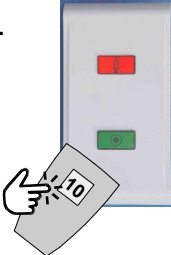
- 

Drücken Sie den IR-Sender mit der Kennung '10'. Halten Sie den Sender vor die grüne Taste!

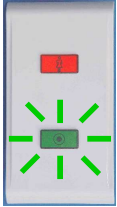

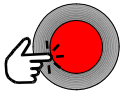Die Anwesenheitstaste leuchtet auf.
- 

Drücken Sie nun die Ruftaste des mobilen Funksenders.



Nachdem die iNetZentrale den Sender erkannt hat, wird diese Zimmerelektronik auf Notruf geschaltet. Die rote Ruftaste beginnt zu blinken.

Quittieren Sie mit der grünen Taste!


Dieser Funksender ist nun im System bekannt, und mit diesem Zimmer verknüpft.

Anlernen der Sender an Zimmerelektronik




Wenn Funkortung benötigt wird, so ist diese VORHER zu programmieren!

Für die Programmierung eines Senders benötigen Sie den IR-Sender mit der Kennung '1'


- 

Drücken Sie den IR-Sender mit der Kennung '1'. Halten Sie den Sender vor die grüne Taste!





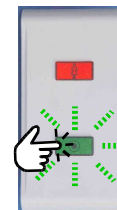


Die Anwesenheitstaste beginnt zu blinken.

2. Auswahl der Rufart



Durch wiederholtes Drücken der grünen Taste wechselt das Blinkmuster der Taste. Jedes Blinkmuster steht für eine Rufart:

-  Funk-Ruf
-  WC-Ruf
-  Bett1-Ruf
-  Bett2-Ruf
-  Zi-Ruf


3. Anlernen



oder



Nach Auswahl der gewünschten Rufart drücken Sie nun die Ruftaste des für die Rufart gewünschten Funksenders für etwa 1 Sekunde.

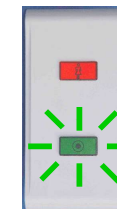

Die grüne Taste leuchtet für 3 Sek. auf.


Die Zimmerelektronik hat den Sender erkannt, und ordnet diesen zukünftig der vorher ausgewählten Rufart zu.

Stand: Feb. 2024

Anlernen der Sender an Zimmerelektronik mit erweiterte Funktionen "Empfindlichkeit des Tastendrucks"


Beim Anlernen eines Funksenders besteht die Möglichkeit die Empfindlichkeit bzw. die erforderliche Dauer des Tastendrucks für jeden Sender in drei Stufen zu variieren.

- | | |
|-----------|--|
| 1. Kurz | Es reicht ein kurzes Antippen des Sendeknopfes |
| 2. Mittel | Sendetaste muss min. 0,4 Sek. gedrückt werden (Standard) |
| 3. Lang | Sendetaste muss min. 1 Sek. gedrückt werden |

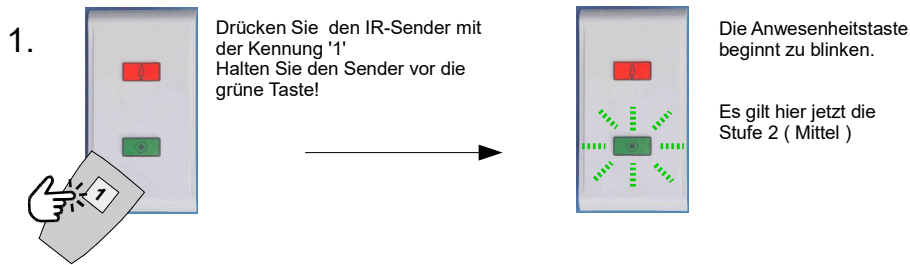


2. Auswahl der Empfindlichkeitsstufe


Grundeinstellung ist nun die mittlere Stufe – Tastendruck min 0,4 Sek. erforderlich. Möchten Sie eine andere Empfindlichkeit für einen Sender einstellen, so

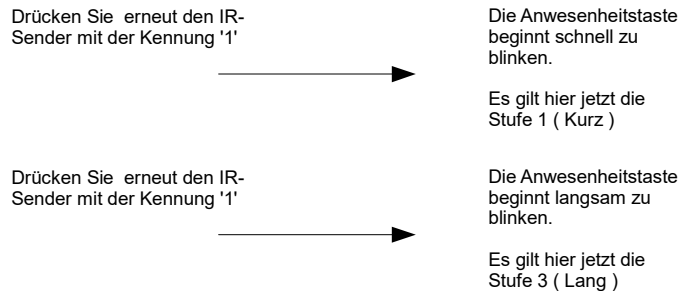


3. Auswahl der Rufart

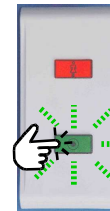


Durch wiederholtes Drücken der grünen Taste wechselt das Blinkmuster der Taste. Jedes Blinkmuster steht für eine Rufart:

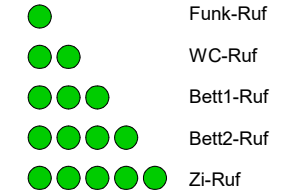

4. Anlernen

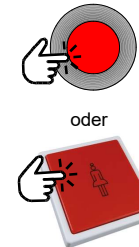

Nach Auswahl der gewünschten Rufart drücken Sie nun die Rufart des für die Rufart gewünschten Funksenders für etwa 1 Sekunde.

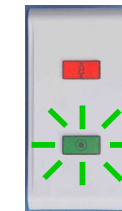

Die grüne Taste leuchtet für 3 Sek. auf.

Die Zimmerelektronik hat den Sender erkannt, und ordnet diesen zukünftig der vorher ausgewählten Rufart mit der eingestellten Empfindlichkeit zu.