


1. Bedienelemente

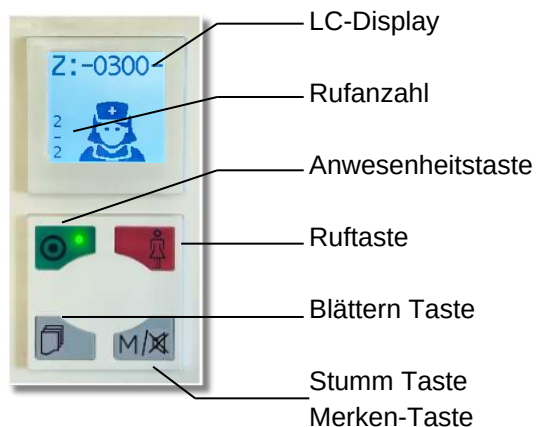

Kurzbedienungsanleitung für die Ausführungen:

910272 Zimmerelektronik LCD

910284 Zimmerelektronik LCD / FSK

911272 Zimmerelektronik LCD 2-Draht

911284 Zimmerelektronik LCD 2-Draht / FSK

2. Gerät aktivieren und Rufe auslösen

- **Anwesenheit melden:** Um Ihre Anwesenheit zu kennzeichnen, drücken Sie die **Anwesenheitstaste**. Eine grüne LED zur Bestätigung leuchtet in der Taste auf.
- **Anwesenheit löschen:** Um Ihre Anwesenheit zu löschen, drücken Sie die Anwesenheitstaste erneut. Die grüne LED in der Taste erlischt.
- **Ruf auslösen:** Drücken Sie die Ruftaste, um einen Ruf im Zimmer zu aktivieren. Der Ruf wird automatisch signalisiert.
- **Notruf auslösen:** Die Anwesenheit muss gesetzt sein. Drücken Sie die **Ruftaste**, um einen Notruf im Zimmer zu aktivieren. Der Ruf wird automatisch signalisiert.
- **Rufnachsendung:** Bei einem Ruf aus einem anderen Zimmer erscheint eine Meldung in der Anzeige, zusätzlich ein Signalton alle 20 Sekunden. Bei „Notruf“ in einem anderen Zimmer ist der Signalton im Sekundentakt.

3. Displayanzeigen verstehen

- **Rufanzeige:** Das LC-Display zeigt den aktiven Ruf an, z. B. „Z. 35 und die Rufart“ „Bett-Ruf“ oder „WC-Ruf“ an.
- **Mehrere Rufe:** Bei mehreren Meldungen in der Anzeige können Sie mit der **Blättern Taste** die Rufe durchblättern.
- **Stummschalten eines Rufes:** Bei akustischem Alarm kann der Ton durch die **Stummtaste** deaktiviert werden, ohne den Ruf zurückzusetzen. Notrufe können nicht stumm geschaltet werden.
- **Erinnerungsfunktion (Merken):** Wird bei gesetzter Anwesenheit ein eingehender Ruf angezeigt und akustisch signalisiert, so kann dieser durch die „Merken“ Funktion für eine eingestellte Zeit „gemerkt“ werden. Die „Merken“ Funktion wird durch langes Drücken (3 Sek.) der **Merken-Taste** aktiviert. Dabei wird sowohl die Textanzeige als auch die akustische Signalisierung für diesen Ruf um die eingestellte Zeit aus der Signalisierung entfernt und intern gespeichert. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Signalisierung wieder aufgenommen, sofern der Ruf noch ansteht.
- **Ein „Notruf“ lässt sich weder „Merken“ noch „Stumm“ schalten!**

4. Wartung und Sicherheit

- **Regelmäßige Überprüfung:** Prüfen Sie regelmäßig die Funktion der Ruf- und Anwesenheitstasten.
- **Störungen melden:** Sollten Funktionsstörungen auftreten, informieren Sie umgehend den technischen Dienst.