

# VarioCare Bewegungssensor

## RUNDUM SICHERHEIT KABELLOS

Für Schwesternrufsysteme und für häusliche Anwendung

Mit Fußtaster-Option

zur Aktivierung der Pflegezeit

**AAL**

**Active Assisted Living**



### Standard-Ausstattung des VarioCare

- Funk Ansteuerung von Schwesternruf-Empfängern oder Zubehör wie Funk-Steckdosen z.B. zur externen Lichteinschaltung.
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku.
- 10-minütige Pflegezeit, aktivierbar per Hand direkt am Melder oder per optionaler Fußtaster-einheit. Während der Pflegezeit wird kein versehentlicher Ruf ausgelöst.
- Magnetischer Standfuß, selbsttrennend.
- Richtungserkennung: erkennt die Richtung, aus der das Pflegepersonal kommt und aktiviert auf Wunsch automatisch die Pflegezeit.  
Da der Patient den Erfassungsbereich aus einer anderen Richtung betritt, löst in diesem Moment der Sensor den Ruf aus und schaltet nachts (optional) das Licht mit an.

### Individuelle Einstellungen des VarioCare, nur über die optionale VarioCare Remote Funk-Fernbedienung:

#### Tag-Nacht-Aktivierung:

- Der VarioCare gibt bei ausreichender Helligkeit keinen Ruf weiter und schaltet kein Licht ein.
- Wird es dunkel im Raum, wird der VarioCare wieder automatisch aktiv.

#### Verschiedene Pflegezeit-Einstellungen:

- Die Pflegezeit ist von 2 bis 40 Min. einstellbar.

#### Aufstehverzögerung:

- Eine Rufauslösung kann zeitlich verzögert erfolgen, damit der Patient Zeit hat, z.B. das WC aufzusuchen. Falls er während der Aufstehverzögerung nicht zurück ist, wird ein Ruf ausgelöst.

#### Funktionen können zu- oder abgeschaltet werden:


- Lichtaktivierung, akustische Meldung, Rufauslösung, automatische Nachtaktivierung.



## Einstellmöglichkeiten und Anzeigen, zum Teil in Verbindung mit der VarioCare Remote Funk-Fernbedienung




Bewegungs-Sensor

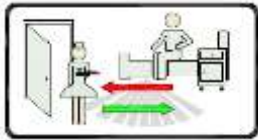

Automatische Pflegezeit-Aktivierung  
Pflegepersonal von rechts kommend

Akku-low Meldung

Automatische Nacht-Aktivierung

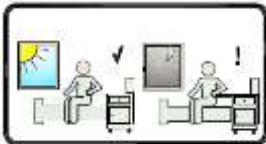

Sensorfläche zur Aktivierung  
der Pflegezeit mit  
Magnetschlüssel

Automatische Pflegezeit-Aktivierung  
Pflegepersonal von links kommend

LED Test  
Programmiermodus

Rufunterdrückung bei Rückkehr des  
Patienten im eingestellten Zeitraum

Programmiertasten

LED zur Bodenausleuchtung  
bei Auslösung

Magnetische Konnektierung!  
Kein Abbrechen bei Stoß gegen  
das Gehäuse.

Fußstastereinheit (Option) zur  
Aktivierung der Pflegezeit.

Leuchtfeld (wenn Fußtaster betätigt)  
bei Voralarm und Pflegezeitablauf





# Höchster Bedien-Komfort

# VarioCare Remote

# Funk-Fernbedienung


mit magnetischer Wandhalterung

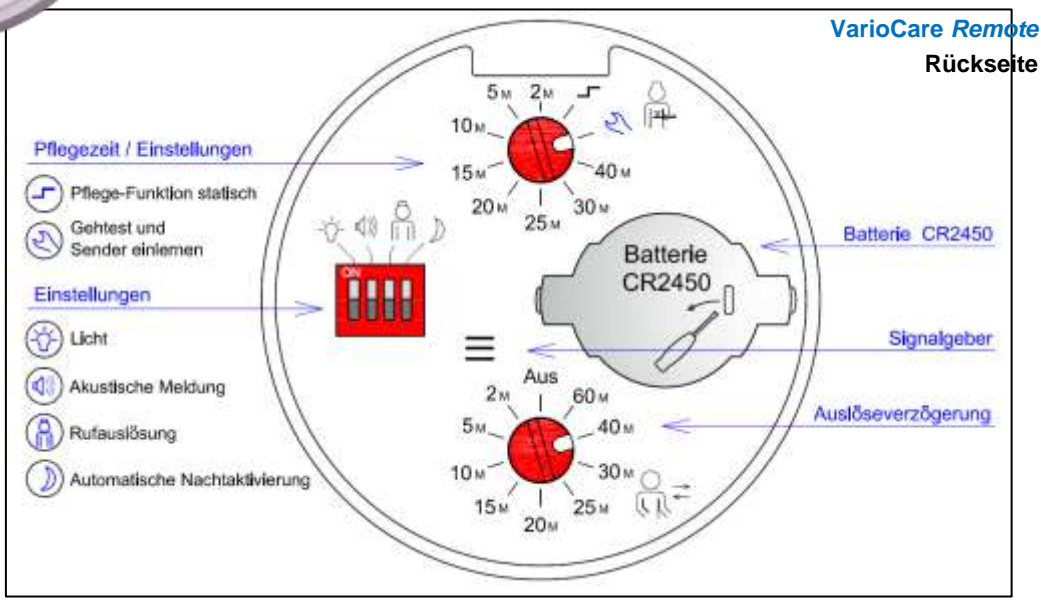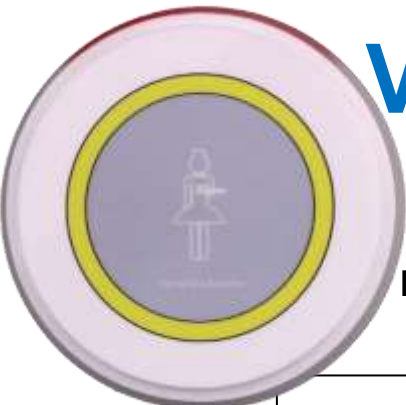


Mit dem **VarioCare Remote** Wandsender erhält man die Möglichkeit, die Pflegezeit mit Druck auf die Pfl egetaste direkt zu aktivieren.

Darüber hinaus können weitere praktische Einstellungen über den **VarioCare Remote** vorgenommen werden, wie die individuelle Pflegezeit von 2 bis 40 Minuten, automatische Nachtaktivierung, individuelle Aufstehverzögerungs-Zeit (Auslöseverzögerung) und vieles mehr.


**Aufstehverzögerung**

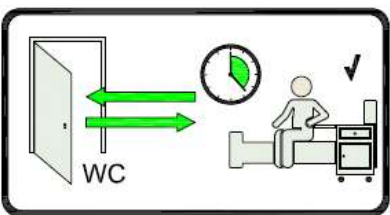

**Tag- Nacht-Aktivierung**

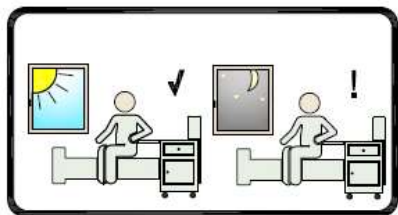

**Richtungserkennung**

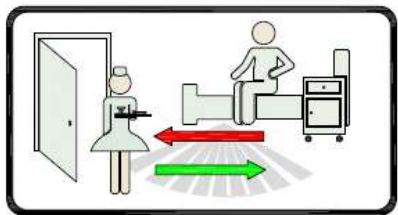

# VarioCare und Zubehör

**VarioCare  
mit magnetischem  
Standfuß**  
(Lieferumfang)



**Magnetische  
Wandhalterung**



**Magnetischer Standfuß  
mit Pflegekaster**



**Höchster Bedien-Komfort:  
VarioCare Remote  
Fernbedienung**  
mit magnetischer  
Wandhalterung



**Schwesternrufempfänger**

Funk-Verbindung mit allen gängigen Schwesternruf-Systemen



**Funksteckdose**

Kann vom VarioCare aus per Funk zum Beispiel ein externes Licht ansteuern, wie Stehlampe etc.

